

Бърз антигенен тест за ковид-19, носен секрет | covid-19 ag self-test, nasal


Какво представлява

Бърз антигенен тест за ковид-19, носен секрет | covid-19 ag self-test, nasal е бърз хроматографски имуноанализ за качествено откриване на sars-cov-2 антигени, присъстващи в човешки назофаринкс. Само за професионална ин-витро диагностична употреба.

Съдържание

1. Назофарингеален тампон
2. Буферна течност
3. Екстракционна епруветка
4. Капаче-капкомер с отвор за екстракционна епруветка
5. Тестова касета


Забележка – възможно е при различните партии екстракционната епруветка да пристигне готова с буферна течност в нея.

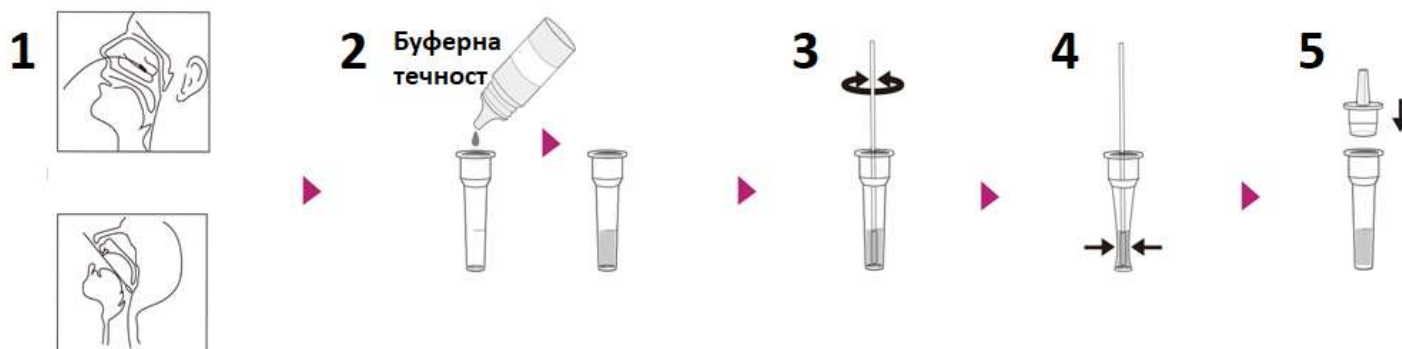

Инструкции за взимане на проба

1. Извадете тампон и внимателно вкарайте мекия край възможно най-дълбоко в носната кухина или гърлото. Внимавайте да не нараните лигавицата. Завъртете леко, за да съберете проба (секрет) и извадете тампона.
2. Отворете съдчето с буферната течност и капнете 10 капки (350 µl (микролитъра) от буферната течност в екстракционната епруветка. **Забележка** – възможно е при различните партии екстракционната епруветка да пристигне готова с буферна течност в нея.
3. Поставете тампона с върха със секрета в екстракционната епруветка, притиснете го към стените на епруветката, за да се размеси пробата с буфера. Разбъркайте буферната течност с тампона за около 10 секунди.
4. Извадете тампона от епруветката, като притиснете леко стените ѝ, за да отделите евентуално останал секрет/разтвор. Внимателно изхвърлете тампона, без да докосвате върха със секрета, тъй като е потенциален биологичен отпадък.
5. Поставете капачето-капкомер върху епруветката и я оставете във вертикално положение с капачето нагоре. Пробата е готова за тестване.


Инструкции за извършване на теста

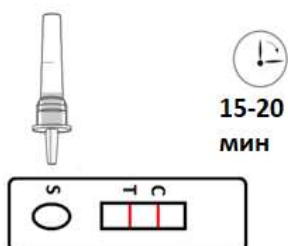

1. Оставете тестовите материали да достигнат стайна температура (от 15°C до 30°C).
2. Извадете тестовата касета от фолиевата опаковка и я поставете на хоризонтална, равна и суха повърхност.
3. Внимателно хванете епруветката, обърнете я с капачето-капкомер надолу и капнете 3 капки проба в сектора за проба на касетата.

4. Изчакайте появата на цветна линия / цветни линии. При висока концентрация линия се появява в рамките на 5 мин. Отчетете окончателно резултата след 15 минути, **но не по-късно от 20 минути.**

Интерпретиране на резултатите от теста

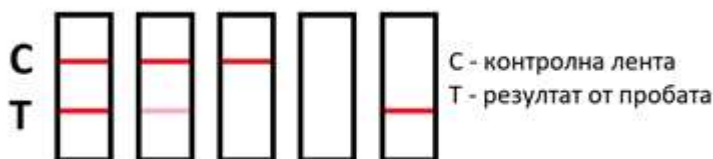

Положителен:* появяват се две отчетливи цветни линии. Едната цветна линия трябва да бъде в контролната зона (с), а другата цветна линия е в тестовата зона (t). Положителен резултат в тестовата зона показва откриване на sars-cov-2 антигени в пробата.

*** Забележка:** интензивността на цвета на линията в тестовата зона (t) ще варира в зависимост от количеството антиген sars-cov-2, присъстващ в пробата. Това означава, че всеки нюанс на цвета в тестовата зона (t) трябва да се счита за положителен.

Отрицателен: една цветна линия се появява в контролната зона (с). Няма очевидна поява на цветна линия в тест зоната (t).

Невалиден: линия в контролната зона не се появява. Недостатъчно количество проба или неправилна процедурна техника са най-вероятните причини за липса на контролна линия. Прегледайте процедурата и повторете теста с нова тест касета и помощни материали. Ако проблемът продължава, прекратете използването на материалите и касетите от партидата и незабавно и се свържете с местния дистрибутор.

Контрол върху качеството

Средство за контрол върху процедурата е включено в теста. За вътрешен контрол върху процедурата се приема липсата на каквото и да е оцветяване при реагента, преди потапянето му в пробата. Стандарти за контрол не са включени в тестовия комплект. Но въпреки това се препоръчва тестване на положителните и отрицателните контроли, като част от добрата лабораторна практика, за да се потвърди процедурата и да се удостовери правилното изпълнение на теста.

Третирайте използваните касети и помощни материали като потенциално заразни и ги изхвърляйте съобразно указанията на властите.

Производител:

ХАНГДЖОУ ЛИСЪН БИОТЕХНОЛОДЖИ КО. ООД;
Бинуен роуд 95, сгр.6, ет.6, Хангджоу,310051,Китай

За поръчки:

КЕРАГОН ЕООД
София, ул. 20-ти април №13
office@keragon.eu, 02/4114081,
www.alcotester.bg

